

Schwenk-/ Hebesitz Typ „Turny“

- Drehen des Autositzes um 90°
- Sanftes Absenken des Sitzes aus dem Auto auf Rollstuhlhöhe
- Kein Hochheben des Rollstuhlfahrers auf den Sitz erforderlich

Stand: 09.02.2016 / Nr.: S5

Das Umsetzen von Rollstuhlfahrern in Großraumlimousinen oder Kleinbussen ist durch die enorme Sitzhöhe der vorhandenen Originalsitze oft ein großes Problem, in einigen Fällen ist das Umsetzen sogar unmöglich. Erleichterung kann bei dieser Problematik der Schwenk-/ Hebesitz Typ „Turny“ bieten. Die Handhabung ist denkbar einfach: Der Sitz wird manuell oder elektrisch um 90° aus dem Fahrzeug gedreht und anschließend per Fernbedienung elektr. bis auf die Höhe der Rollstuhlsitzfläche abgesenkt. Ein bequemes Umsetzen vom Rollstuhl in den Sitz ist nun möglich. Wiederum per Knopfdruck wird der Sitz sanft angehoben und anschließend in den Fahrgastraum geschwenkt.



Die Funktionalität des Schwenk-/ Hebesitzes ist abhängig vom Fahrzeugtyp, der Türbreite, der Türhöhe, des Armaturenbrettes und natürlich von der zu verladenen Person. Standardmäßig wird das Turny-System auf der Beifahrersitzposition montiert. Bei einigen Fahrzeugtypen ist jedoch auch eine Montage auf der Fahrersitzposition oder in der zweiten Sitzreihe denkbar. Der Originalsitz ist nicht verwendbar. Bei sehr engen Fahrzeugmaßen gibt es seit neustem ein elektr. fahr- und programmierbares System (Turny-Evo), welches sehr eng um den Türholmen dreht und dadurch mehr Beinfreiheit garantiert. Eine Kombination des Turny's mit dem Carony-System, bei welchem der Sitz komplett aus dem Fahrzeug auf ein neues Rollstuhlunterteil gezogen wird, ist gut möglich.

